

研究用

新型コロナウイルス抗原検査キット

検査手順説明書


COVID-19 AG

説明書以外の使い方をした場合は判定結果がエラーになりますので、説明書を最後までよく読んで正しくご使用ください。

【使用上の注意】

- ご使用に際しては説明書をよくお読みいただき、ご使用される方ご自身の責任による自己採取のもと正しくご使用ください。
- 本製品は、20歳以上の方を対象としております。本キットおよび付属品は、医療機器ではなく研究用製品となります。
- 本製品は、医薬品医療機器等法に基づく体外診断用医薬品ではありません。
- 本製品は、研究や調査を目的としたもので本検査以外の目的には使用できません。
- 本製品を用いた検査判定はいかなる意味でも医療診断や治療を目的とするものではありません。
- 本製品は高温多湿および直射日光を避け、室温2~30°Cの冷暗所で保管してください。
- 本製品は小児の手の届かない所に保管してください。

【キット内容】

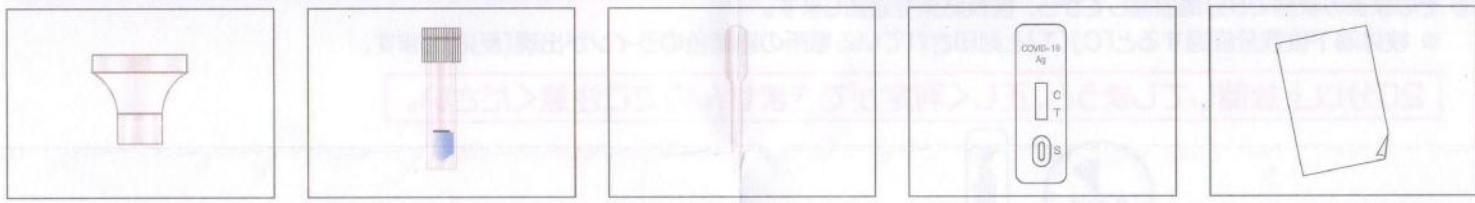

① 検体採取用ろうと ② 専用検体希釈液入り容器 ③ 検体採取用スポット ④ テストプレート ⑤ 検査手順説明書


【検査手順】

● 検査前の準備と注意事項

- キットの製造日と使用期限を確認してください。
- 室温15~30°Cの部屋で、キットは平らな場所に置いて使用してください。
- 開封してから1時間以内に検査を終了させてください。
テストプレートの袋を開封してから30分以内に検査を終了させてください。
- 唾液採取のおおよそ30分前に口を水で軽くすすいでください。
その後、検査まで飲食や喫煙、歯磨きやうがい薬を使用したうがいはしないでください。
- 手を洗い、必要であればアルコール等で消毒します。

● 検体(唾液)の採取

- 専用検体希釈液入り容器(キャップ付き容器)のキャップを外し、検体採取用ろうとをセットします。

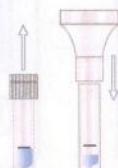

- 気泡のない唾液を口の中に集めるため、頬を1~2分間マッサージします。

- 唾液(気泡のないもの)が1mLのラインに達するまでろうとに吐き出します。

※ 気泡部分が1mLのラインを超えていても問題はありません。

